

MODE D'EMPLOI

La bonne utilisation du moniteur Respisense améliorera considérablement votre expérience en tant qu'utilisateur. Veuillez lire soigneusement ce mode d'emploi.

Adressez vous pour toutes vos questions à votre fournisseur local : Unicell: Tel :03/776.66.11
Email : unicell@skynet.be. Visitez www.respisense.com pour des informations actuelles ainsi que des démonstrations du produit. Envoyez vos commentaires et suggestions au support@infantrust.com.


IMPORTANT:

Read all the instructions carefully before using the monitor • Keep the monitor dry; wipe with a damp cloth; never rinse the monitor • Keep these instructions for reference for the entire life of the monitor • Use this monitor sensibly • Using make-shift straps to hold the monitor may create a restriction hazard • Examine the monitor before every use and do not use if worn, damaged or not functioning properly • The monitor must only be used where all its functions can be observed by a caregiver • Keep the monitor safely stored and away from children when not in use • Contains small parts that could be dangerous to children.

Take care of sizeable outside movements that might confuse the monitor, such as while travelling or pushing baby in a stroller over uneven surfaces, or allowing the monitor to touch another body while in operation.

Avis de non-responsabilité: Ce moniteur bébé est un appareil destiné aux parents et n'est pas un appareil médical ni un substitut aux soins humains. Il doit être utilisé dans des conditions de fonctionnement sûres et doit être utilisé de manière responsable et selon le mode d'emploi détaillé présenté dans ce livret. Le diagnostic et le contrôle d'une maladie doivent être réalisés par un professionnel médical. Les prématurés et autres nouveaux nés à haut risque, ou les enfants affectés par une prédisposition connue à l'apnée devraient être suivis par un médecin. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé dans des situations de soutien vital. Les clients utilisent ce moniteur à leurs propres risques et Infantrust Parenting Solutions (Proprietary) Limited, son personnel, ses agents, ses entrepreneurs, ses fabricants, ses distributeurs et associés (« INFANTRUST ») ne peuvent être tenus responsables en cas de perte, dommage ou blessure, y compris les pertes, dommages ou blessures immatérielles, dont le client ou toute autre personne pourrait souffrir à la suite ou en lien avec l'utilisation ou la fabrication du moniteur, y compris en cas de perte, de dommage ou de blessure dont le client ou toute autre personne pourrait souffrir suite à un défaut quel qu'il soit (patent comme latent) relatif au moniteur, et toutes les garanties, qu'elles soient exprimées, impliquées ou tacites, ainsi que toute autre responsabilité décollant de quelque cause que ce soit, est par conséquent expressément exclue par la présente et le client indemnise par la présente et ne peut tenir INFANTRUST responsable en cas d'une telle responsabilité.

Ne pas rincer le moniteur ni l'immerger dans un liquide et évitez de faire pénétrer du liquide dans les ouvertures. En cas de pénétration de liquide, votre garantie ne fonctionnera pas. Pour nettoyer l'unité, utilisez un tissu doux et légèrement humide. Ne pas utiliser de produits chimiques étant donné que ceci pourrait irriter la peau du bébé.

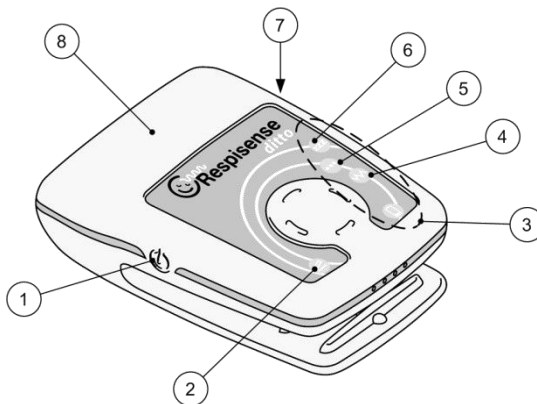

FONCTIONNEMENT DU MONITEUR

1 ON/OFF bouton

ON : Pour mettre en marche le moniteur, vous appuyez courtement sur le bouton ①. Le moniteur sera mis en marche et fera un autodiagnostic au cours de laquelle le dispositif se met à vibrer, les indicateurs ③ à ⑥ illumineront pendant que vous entendrez les tons (bas-haut). Vérifiez toujours l'autodiagnostic avant d'utiliser le moniteur.

Ton facultatif 'tic' : si vous appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF, pendant que le moniteur est activé, vous entendrez un ton 'tic' chaque fois qu'un signal est détecté. Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton pour arrêter cette fonction.

OFF : Pour arrêter le moniteur vous appuyez sur le bouton ① jusqu'au moment où vous entendez les tons (haut-bas). La durée de vie de la pile sera montrée.

2. Lumière bleue

La lumière bleue clignotera quand le contact entre le moniteur et le ventre du bébé est interrompu. Vérifiez le linge et le moniteur pour un contact optimal.

3. Lumière rouge et indication pile

Quand vous éteignez le moniteur vous verrez une lumière rouge, orange, jaune ou verte qui indiquera la durée de vie de la pile. La lumière rouge clignotera quand il y a une erreur dans le système ou quand la pile est presque vide. Remplacez la pile.

4. Lumière orange

L'indicateur orange 'Aucun signal' clignote à plusieurs reprises avec des vibrations ou alors que l'alarme sonore retentit. Après le moniteur a vibration au moins une fois cette lumière clignote de détection du signal au lieu de vert ou jaune.

5. Lumière jaune

La lumière jaune marquée "•••" clignote lorsque bébé est éveillé et actif.

6. Lumière verte

Le voyant vert clignote marqué "•••" tandis que bébé dort.

7. Détecteur

Le détecteur se trouve à l'arrière du clip pour une sensibilité maximale, là où les différences de pression peuvent être mesurées entre le linge et le ventre du bébé.

9. Pile

Remplacement de la pile :

- levez le clip blanc
- remplacez la pile
- remettez en place le clip blanc..



Enregistrer votre moniteur: Veuillez enregistrer votre moniteur immédiatement. Le fait d'enregistrer votre moniteur vous permettra de téléverser une photo de votre bébé dans l'album du site Web de Respisense. Les informations rassemblées sont utilisées pour améliorer les produits et les services Infantrust, elles ne seront jamais utilisées dans la distribution de matériel publicitaire de quelque type que ce soit. Toutes les informations fournies sont protégées par les politiques sur la protection de la vie privée d'Infantrust et ne sont jamais partagées, vendues ou louées. Vous pouvez procéder à l'enregistrement par notre page Web à l'adresse suivante www.respisense.com.



Comment fixer le moniteur : En mettant le linge vous devez plier le bord supérieur. Attachez le linge d'une telle manière qu'il soit bien adapté autour du ventre du bébé. Mettez le moniteur en marche et attachez-le au linge, du côté du nombril.

Le moniteur peut être attaché sur un linge ou tout autres vêtements avec une ceinture convenable. Vous pouvez l'utiliser aussi au-dessus d'une très mince couche de vêtements. Ne pas utiliser le moniteur sur des ceintures épaisses qui pourraient endommager le système d'attache du moniteur. Si votre bébé dort sur son côté, vous attachez le moniteur sur ce côté, mais il faut bien vérifier s'il y a un bon contact entre le moniteur en le ventre du bébé pour une utilisation optimale.

Usage du moniteur

1. Mettez le moniteur en marche (voyez : ON/OFF bouton)
2. Attachez le moniteur (voyez : comment fixer le moniteur)
3. La lumière verte ou jaune clignote en fonction de signaux détectés par le capteur.
4. Le moniteur se met à vibrer si aucun signal est détecté pendant 15 secondes.
5. L'alarme primaire (tonalité de ramage rapide) retentit si aucun signal n'a été détecté pour un total de 20 secondes consécutives.
6. L'alarme secondaire (lente de ton ramage) retentira si les vibrations (voir 4 ci-dessus) a été activé 3 fois mais la détection de signal repris dans les 5 secondes de la vibration. Ceci peut indiquer que le moniteur ou le linge n'était pas bien attaché, que le linge est trop mouillé et que le contact entre linge et le ventre a été interrompu, ou que le bébé a arrêté de respirer quelques moments, mais qu'il a repris de nouveau la respiration après la stimulation. Il faudra réattacher de nouveau le linge et le moniteur ou changer le linge (taille plus grand) si trop mouillé.

Astuces:

Le moniteur détecte les mouvements du ventre du bébé par l'intermédiaire d'un détecteur sensible à la pression, situé derrière la membrane arrière. Les signaux sont les plus faciles détectable à proximité et légèrement d'un côté du nombril du bébé. Si l'unité a de la difficulté à détecter des signaux de la couche ne peut pas être bien ajustées, ou peut être une taille trop petite.

Dans le cas peu probable où le moniteur de glisser pendant le fonctionnement, il ne parviendra pas à détecter les signaux et l'alarme sonnera.

Garantie: INFANTRUST fournit une garantie de 2 ans sur le produit à compter de la date de vente. Comme INFANTRUST ne dispose d'aucun contrôle sur la manière dont le moniteur est stocké et utilisé, la durée de vie de la batterie est exclue de cette garantie. Le client doit fournir une preuve d'achat pour toute réclamation. INFANTRUST éliminera tous les défauts du moniteur résultant de défauts de matériaux ou de fabrication en remplaçant gratuitement le moniteur, à l'exception des frais de transport, au cours de la période couverte par la garantie. La garantie fonctionne dans tout pays où ce moniteur est fourni par INFANTRUST ou son distributeur désigné. La garantie sera rendue nulle en cas d'endommagement, d'ouverture ou d'altération du moniteur.

Garantee: INFANTRUST grants a two year guarantee on the product extending from the date of sale. The claimant must supply proof of purchase with every claim. Battery life is excluded from the guarantee. Within the guarantee period INFANTRUST shall eliminate any defects in the monitor resulting from faults in materials or workmanship by replacing the monitor free of charge excluding transport costs. This guarantee extends to every country where this monitor is supplied by INFANTRUST or its appointed distributor. The guarantee will become null and void if the monitor has been damaged, opened or tampered with.

Specifications:

Battery: ER14250M 3.6V.

Conçu et fabriqué en Afrique du Sud par Infantrust Parenting Solutions (Pty) Ltd., PO Box 3316, Matieland, 7602, Afrique du Sud.
ZA2006/01793; GB2419961; ZH200480020877.1; IN233665; US11/307,361 and CIP, 12/856,476; DE602004030691-6; BE1653850; GB2419961 applicables. Brevets supplémentaires en attente internationalement. Tous droits réservés ; Respisense, Infantrust, TummyTickle et les logos qui y sont associés sont des marques de commerce.

Pour améliorer les moniteurs, l'apparence et les spécifications du moniteur peuvent changer sans préavis.

© Droits d'auteur 2015 Infantrust. Tous les droits sont réservés.